

Assistant d'aide à la toux



MOVE AND CARE CONCEPT BY

EOVE

Air Liquide Healthcare

Protéger les vies vulnérables

Chaque patient souffrant de pathologie chronique requiert un **accompagnement personnalisé en continu**. Air Liquide Healthcare développe des **solutions** pour :



Faciliter les prises de décision à l'hôpital ou en cabinet visant à poser un diagnostic, initialiser ou adapter un traitement.



Proposer des traitements du quotidien confortables et adaptés au domicile du patient.



Faciliter l'interaction entre le prestataire de santé et les équipes médicales pour identifier les patients à risque, anticiper les événements et concentrer l'attention sur ceux qui en ont le plus besoin.

L'accessibilité à l'aide à la toux

L'EOVE-70 est un appareil de management des sécrétions, permettant d'augmenter le débit expiratoire de pointe du patient, ainsi que son volume courant.




Traitement complet et polyvalent

- ▶ Différents modes de traitement
 - ▶ In-exsufflations mécaniques
 - De hautes performances avec une plage de pressions de -70 à +70 cmH₂O
 - Possibilité d'oscillations réglables
 - ▶ Recrutement pulmonaire (IPPB)
- ▶ Des accessoires pour s'adapter à chaque situation : *écran tactile, pédale, monitoring SpO₂*
- ▶ Différentes alternatives de traitement : *3 programmes personnalisables et renommables*



Interface intuitive

- ▶ Ecran de 7 pouces haute définition
- ▶ Simplicité d'accès aux réglages
- ▶ Monitoring des paramètres visible sur l'écran
- ▶ Traitement manuel facilité grâce au pavé tactile

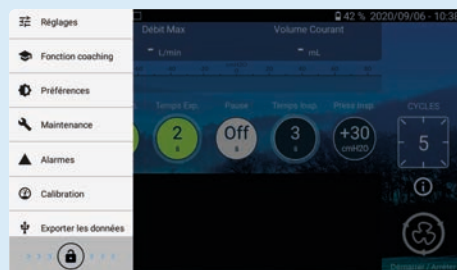



Le patient au coeur du traitement

Utilisable au domicile du patient, chez les kinésithérapeutes et à l'hôpital.

Fonction coaching



- ▶ Un environnement dédié au coaching du patient
- ▶ Un accompagnement tout au long de la séance

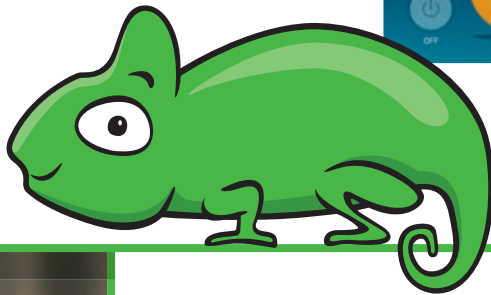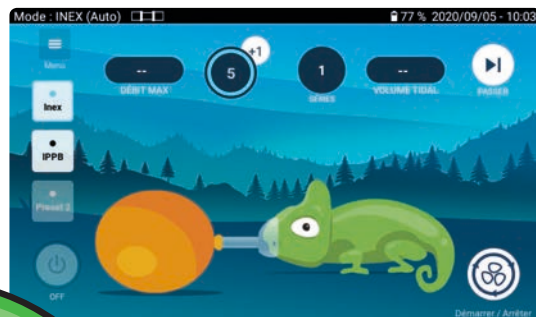

Des conditions de traitement améliorées : liberté et mobilité

- ▶ Un module de traitement extractible pour un encombrement minimal et une portabilité améliorée
- ▶ Une batterie interne pour une utilisation au plus près du patient quelque soit l'environnement
- ▶ Une autonomie de 4 séances de 20 minutes



Le suivi du patient :

- ▶ récupération des données via une clé USB



**Ecran tactile
intuitif**

**Récupération
des données
via USB**

**Mode de
recrutement
pulmonaire**

**Fonction
coaching**

**Appareil d'aide
à la toux
et relaxateur
de pression**

**3 programmes
renommables et
personnalisables**

**Mobilité
et liberté :
autonomie
de 4 séances**



Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	Poids	Taille
Station	1,6 kg	25 x 21 x 13 cm
Module	1,8 kg	24,5 x 14,5 x 10 cm
Ecran	7 pouces, tactile, couleur, HD	

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	INEX	IPPB
Modes opératoires	INEX : Insufflation Exsufflation	IPPB : relaxateur de pression
Modes de traitements	Automatique / Manuel	Automatique
Oscillations	ON / OFF sur l'inspiration Fréquence : 4 à 20 Hz Amplitude : Faible / Moyenne / Élevées	/
Monitoring	Volume Courant / Peak Flow / SpO ₂ / Fréquence cardiaque	

REGLAGES			
	INEX		IPPB
Pression inspiratoire	5 à 70 mbar	Débit	5 à 100 l/min
Temps inspiratoire	0,5 à 5 sec	Pression maximum	10 à 50 mbar
Pente	0 à 5	Temps maximum	0,5 à 20 sec
Trigger	OFF / 1 à 3	PEEP	1 à 20 mbar
Pause	OFF / 0,5 à 5 sec	Trigger	OFF / 1 à 5
PEEP	1 à 20 mbar	Débit inspiratoire	Carré / Descélérant
Pression expiratoire	0 à -70 mbar		

Références

Désignation	Référence ALMS	Référence EOVE
EOVE-70 Assistant de toux	KC072279	EO-70SMD EUR
Pédale de contrôle EOVE-70	KC072277	EO-70FSWITCH
Nonin Xpod SpO ₂ câble	KC072267	EO-SPO2CBL

Contact

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS
Parc de Haute Technologie
6, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex

www.device.airliquidehealthcare.com



EOVE-70 fournit un traitement pour les patients qui ne sont pas capables de gérer l'évacuation de leurs sécrétions par eux-mêmes. Il fournit un mode Insufflation – Exsufflation (INEX) et un mode relaxateur de pression (IPPB – Intermittent Positive Pressure Breathing) pour les adultes et les enfants - Dispositif médical de classe IIb - CE 0459 - Fabricant : EOVE - Remboursé par l'assurance maladie dans certaines situations : consulter les modalités sur le site ameli.fr - Lire attentivement le manuel d'utilisation - Avril 2021 - Air Liquide Medical Systems, Antony 348 921 735 RCS Nanterre.