

Respireo
Hospital F

Masque facial à usage hospitalier



La solution pour
bénéficier d'une
expertise complète
en ventilation
non invasive

Respireo™ Hospital F représente une gamme de masques faciaux **jetables** et **réutilisables, avec et sans fuite**, spécifiquement dédiés à un **usage hospitalier** et entièrement conçus pour l'**assistance respiratoire non invasive** des patients. Disponibles en **trois tailles** différentes, ils ont été développés pour offrir un ajustement confortable à un large éventail de patients et ainsi maximiser la tolérance au traitement.

Respireo Hospital F

Une conception simple et réfléchie

Harnais ajustable

Pensé pour être facile à mettre en place et adaptable à toute morphologie

Support frontal en silicone
Conçu pour assurer la stabilité du masque et le confort du patient

Bouton de réglage
Développé pour ajuster le support frontal sur le front du patient (16 réglages possibles)

Cadre transparent
Pensé pour offrir une ligne de vue optimale aux professionnels de santé

Bulle à double jupe en silicone

Offre une étanchéité optimale en s'adaptant au visage des patients

Port de mesure
Orifice unique pour mesurer la pression

Clips de détache rapide

Conçus pour une pose facile du harnais et un détachement rapide en cas d'urgence

Coude rotatif à 360°
Facilite le mouvement et la position du tube



Une large gamme de masques pour une grande variété de patients

Jetable

Usage unique jusqu'à 7 jours



Sans fuite avec
connecteur femelle



Sans fuite avec valve
anti-asphyxie et
connecteur femelle



À fuite avec
connecteur mâle

Réutilisable Multi-patients



Sans fuite avec
connecteur femelle




- Bulles disponibles en 3 tailles (S, M, L)
- Support frontal inclinable pour une stabilité optimale
- Masque, bulle, harnais et gabarit inclus dans le paquet


Instructions d'installation

Avant toute chose, utilisez le gabarit de taille figurant sur l'emballage pour déterminer la taille correcte du masque pour le patient


- 1 Tournez la molette au maximum

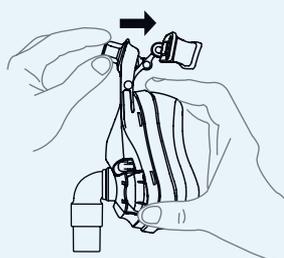


- 2 Posez le masque sur le visage du patient

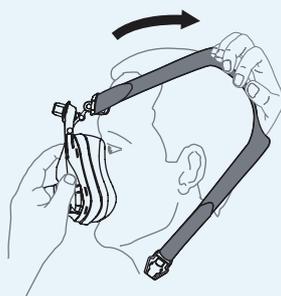

- 3 Ajustez le harnais

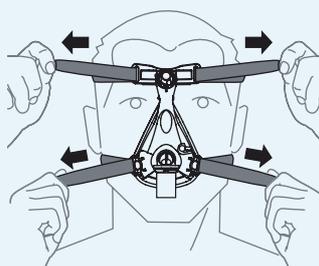

- 4 Réglez la molette pour une meilleure étanchéité

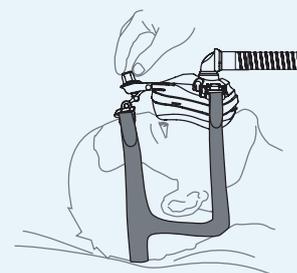

Références

Respireo™ Hospital F Disposable

Code produit	Description	Taille	Code distributeur
472539	Respireo™ Hospital F Vented Disposable	S	KM226400
472540	Respireo™ Hospital F Vented Disposable	M	KM226500
472541	Respireo™ Hospital F Vented Disposable	L	KM226600
472542	Respireo™ Hospital F Non Vented Disposable	S	KM222100
472543	Respireo™ Hospital F Non Vented Disposable	M	KM222200
472544	Respireo™ Hospital F Non Vented Disposable	L	KM222300
472526	Respireo™ Hospital F Non Vented Disposable with anti-asphyxia valve	S	KM229132
472527	Respireo™ Hospital F Non Vented Disposable with anti-asphyxia valve	M	KM229133
472528	Respireo™ Hospital F Non Vented Disposable with anti-asphyxia valve	L	KM229134

Respireo™ Hospital F Reusable

Code produit	Description	Taille	Code distributeur
472545	Respireo™ Hospital F Non Vented Reusable	S	KM218800
472546	Respireo™ Hospital F Non Vented Reusable	M	KM218900
472547	Respireo™ Hospital F Non Vented Reusable	L	KM219000

Pièces détachées :

Code produit	Description	Taille	Code distributeur
472453	Harnais Hospital F x10	Taille Unique	KM222400
472615	Bulle Respireo™ Primo F/Hospital F x10	S	KM218500
472616	Bulle Respireo™ Primo F/Hospital F x10	M	KM218600
472617	Bulle Respireo™ Primo F/Hospital F x10	L	KM218700

Fabriqué par

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.r.l
Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano (MI) - ITALY
PLANT: Via dei Prati, 62 - 25073 Bovezzo (BS) - ITALY
Tel. +39 030.201.59.11
Fax +39 030.209.83.29

Contact distributeur

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.A.
Parc de Haute Technologie
6, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
France

fr.medicaldevice.airliquide.com

 Hotline ALMS : **0 820 146 359** Service 0,12 €/min + prix appel



Respireo™ Hospital F Vented disposable est un masque bucco-nasal à fuites (vented) destiné à être utilisé en milieu hospitalier durant une courte période (7 jours maximum), pour le traitement d'un seul patient adulte (pesant plus de 30 kg) pour lequel une thérapie à pression positive continue (CPAP) ou Bilevel (ventilation à double niveau de pression positive) a été prescrite.

Respireo™ Hospital F Non Vented Disposable est un bucco-nasal sans fuites (non vented) destiné à être utilisé en milieu hospitalier durant une courte période (7 jours maximum), pour le traitement d'un seul patient adulte (pesant plus de 30 kg) en ventilation non invasive contrôlée à pression positive (VNIPP).

Respireo™ Hospital F Non Vented Disposable with anti-asphyxia valve est un masque bucco-nasal sans fuites (non vented) et avec une valve anti-asphyxie destiné à être utilisé en milieu hospitalier durant une courte période (7 jours maximum), pour le traitement d'un seul patient adulte (pesant plus de 30 kg) en ventilation non invasive contrôlée à pression positive (VNIPP).

Respireo™ Hospital F Non Vented reusable est un masque bucco-nasal sans fuites (non vented) destiné à être utilisé en ventilation non invasive contrôlée à pression positive (VNIPP) chez des patients adultes (pesant plus de 30 kg).

Dispositif médical de classe IIa CE 0051 - Remboursé par l'assurance maladie dans certaines situations : consultez les modalités sur le site ameli.fr - Lire attentivement le manuel d'utilisation.