


EVO-300

Relaxateur de
pression (IPPB)



*La rééducation
par la respiration*

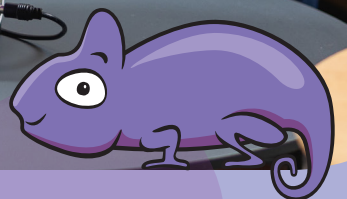



EO-300



Un concentré de simplicité



- L'EO-300 est un appareil **relaxateur de pression (IPPB)** qui favorise l'expansion pulmonaire thoracique et le désencombrement des voies respiratoires. Il convient aux adultes et aux enfants à partir de 10 kg et peut être utilisé en combinaison avec différentes interfaces, comme un masque, un embout buccal ou une canule de trachéotomie.



- **Fonction Coaching** : fonctionnalité brevetée qui offre aux cliniciens un outil intuitif pour mieux former et adapter leurs patients à la thérapie.



- **Silencieux, léger et facile à utiliser.** Idéal pour les pathologies respiratoires chroniques à domicile, en institution ou en hôpital.



L'EO-300 rend le patient actif et sensible à sa thérapie. Il contribue à mobiliser les sécrétions y compris dans les zones distales, augmenter la capacité vitale et/ou améliorer l'expansion pulmonaire.



Accessibilité immédiate

Consignes et paramètres de monitoring sont réunis sur un même écran. La navigation et l'ajustement éventuel des consignes sont ainsi facilités.

Le **bip de transition** signale la transition de l'expiration à l'inspiration, ce qui rend la thérapie plus facile à comprendre.

La **technologie de turbine silencieuse** de l'EO-300 contribue au confort de la thérapie.



Performance et Polyvalence

La synchronisation du patient avec l'appareil est assurée par des triggers spécialement développés pour maximiser son confort.

L'appareil EO-300 peut stocker jusqu'à **trois pré-réglages de thérapie différents**, personnalisant le traitement de chaque patient en fonction de ses besoins et traitements.

Une source externe d'oxygène et/ou de nébulisation peuvent être connectées au circuit patient enrichissant ainsi la thérapie **IPPB**.




Suivi de la thérapie & Entretien


La fonction « **téléchargement des données** » permet aux cliniciens de récupérer les données d'observance et de les analyser hors ligne grâce au **logiciel clinique** dédié. Facile à entretenir grâce au seul changement annuel du filtre d'entrée d'air.



Zoom sur la Fonction Coaching

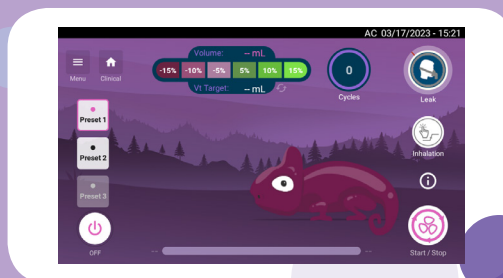

Le caméléon se gonfle pendant l'inspiration et devient vert quand il atteint et dépasse le volume initial.

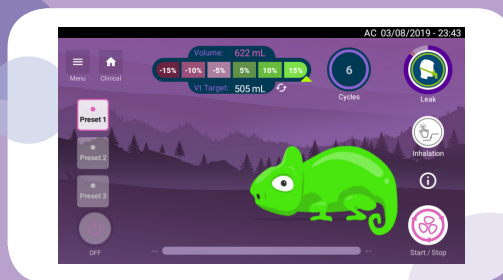

Une flèche sous le bargraphe indique le niveau atteint par rapport au volume initial.



Caractéristiques techniques

DIMENSIONS	Poids	Taille
Module	<3,3kg	274 x 207 x 132 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Débit Insp. (l/min)	5 - 100
Pente Insp.	ON/OFF
Temps de plateau	0,5 - 5 / NON
Pression Max. (cmH ₂ O)	10 - 50
Trigger Insp.	1 - 8
Pente Expi.	0 - 5
Temps Insp. Max (s)	1 - 20
Temps de traitement (min)	OFF / 5 - 30

Monitorages

Volume inspiratoire (VTI)	0 à 4000 ml
Temps Inspiratoire	0 à 9,9 s
Temps Expiratoire	0 à 9,9 s
Temps de pause	0 à 99,9 s
Pic de débit expiratoire	0 à 300 l/min
Freq. Resp.	0 à 99,9 bpm

Une valeur surveillée affichée sous la forme « - » signifie que la mesure n'est pas disponible ou invalide.

Références

Désignation	Référence produit	Référence ALMS
EO-300 IPPB	EO-300SMD	KC072298

Accessoires :

Câble secteur	EO-PWRCHRG-2	KC072300
Béquilles	EO-UPRIGHT	KC072287
Sacoche de transport	EO-CARBAG300	KF008009



Scannez ici et explorez notre site internet



Scannez ici et découvrez notre EO-300 playlist vidéo tutoriel



Fabriqué en France



Fabriqué par

EOVE™
Hélioparc
4, Boulevard Lucien Favre
64000 Pau
France
www.eove.fr

Distribué par

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.A.
Parc de Haute Technologie
6, rue Georges Besse
92182 Antony Cedex
France

fr.medicaldevice.airliquide.com

Hotline ALMS : **0 820 146 359** Service 0,12 €/min + prix appel

 **Air Liquide**
HEALTHCARE

EOVE

L'EO-300 est un appareil relaxateur de pression (IPPB) qui favorise l'expansion pulmonaire thoracique et le désencombrement des voies respiratoires. Le dispositif est destiné aux patients pédiatriques et adultes pesant au moins 10 Kg (22lbs); qui ont besoin d'être assistés dans la gestion de l'évacuation de leurs sécrétions respiratoires et nécessitent une amélioration de leur volume pulmonaire.

Dispositif médical de classe IIb - CE 0459 - Fabricant : EOVE - Remboursé par l'assurance maladie dans certaines situations : consulter les modalités sur le site ameli.fr - Lire attentivement le manuel d'utilisation - Air Liquide Medical Systems, Antony 348 921735 R.C.S Nanterre.